

¡ATTENTION!

Lire attentivement les instructions suivantes.
Vos turbines et petits équipements vous en remercieront.

SUIVRE LES INSTRUCTIONS POUR LA BONNE CONSERVATION DE VOS TURBINES:

1. Débrancher la turbine avec la fraise en position.
2. Brossage extérieur sous le robinet.
3. Brancher.
4. Faire fonctionner la turbine avec la fraise pendant 20-30 secondes pour nettoyer les conduits.
5. Enveler la fraise.
6. Débrancher la turbine.
7. Injecter du lubrifiant à l'arrière de la turbine jusqu'à ce qu'il ressorte à l'avant de la turbine. (Trou de fraise pour Bien Air).
8. Brancher la turbine.
9. Introduire la fraise.
10. Faire fonctionner la turbine afin de distribuer le nettoyeur/lubrifiant et expulser le restant.
11. Enlever la fraise.
12. Débrancher la turbine.
13. Sécher avec un linge l'excès de lubrifiant extérieur.
14. Nettoyer les fibres optiques (à l'avant et à l'arrière) à l'aide d'un bâtonnet humidifié d'alcool.
15. STÉRILISER. Après stérilisation, retirer tous les instruments et turbines de l'équipement. Ne pas les laisser dans l'autoclave durant la nuit.

Tel. France
09 75 18 27 40



Parque Empresarial KUEBIDE
Larrondo Goiko, 5 - Pabellón 12
E-48180 LOIU (Bilbao) Espagne
Tel: +34 94 441 39 99
Fax: +34 94 441 89 08
e-mail: france@rosnerdental.com
www.rosnerdental.com

