

¡ATENCIÓN!

Le sugerimos que lea detalladamente las siguientes instrucciones. Sus turbinas e instrumentos se lo agradecerán.

INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA LA BUENA CONSERVACIÓN DE TURBINAS

1. Desconectar la turbina.
2. Cepillado exterior bajo el grifo.
3. Conectar y colocar una fresa.
4. Hacerla funcionar con la fresa durante 20-30 seg. para limpiar los conductos.
5. Quitar la fresa.
6. Desconectar la turbina.
7. Echar lubricante/limpiador por detrás hasta que salga por el cabezal (borden por el orificio de mayor tamaño. Midwest por el orificio de tamaño intermedio). Con excepción de las turbinas BIEN-AIR que únicamente admiten el sistema lubrimed. Recuerde lubricar el eje también.
8. Conectar la turbina.
9. Poner la fresa.
10. Hacer funcionar la turbina para distribuir el limpiador/lubricante y expulsar el sobrante.
11. Quitar la fresa.
12. Desconectar la turbina.
13. Secar con un paño el exceso del lubricante exterior.
14. Limpiar las fibras ópticas (en el cabezal y detrás) con un bastoncillo humedecido en el alcohol.
15. ESTERILIZAR (Después de la esterilización, todos los instrumentos y turbinas deberán de retirarse inmediatamente del aparato. No dejarlos en el autoclave durante la noche).

Tel.: 94 441 39 99
sat@rosnerdental.com

ROSNER



DENTAL

Parque Empresarial KUEBIDE
Larrondo Goiko, 5 - Pabellón 12
48180 LOIU (Bilbao - Vizcaya)
Tels. 94 441 39 99
Fax: 94 441 89 08
e-mail: sat@rosnerdental.com
www.rosnerdental.com

